


1. Eigenschaften

Der Duschstuhl besteht aus einem Aluminiumrahmen, einem drehbaren Sitz aus strapazierfähigem PVC und Beinen mit rutschfesten Gummikappen. Dank der Höhenverstellung per Druckknopf kann der Stuhl an die Körpergröße des Benutzers angepasst werden. Darüber hinaus ist der Stuhl mit einem werkzeuglosen System ausgestattet, das die Montage erleichtert.

Das Set beinhaltet: Sitz, Basisrohre – 2 Stück, höhenverstellbare Beine – 4 Stück, Befestigungsschrauben – 5 Stück.

Elemente des Duschstuhls:

- A. Sitz
- B. Basisrohre
- C. Höhenverstellung -
Arretierstift
- D. Anti-Rutsch-Spitzen

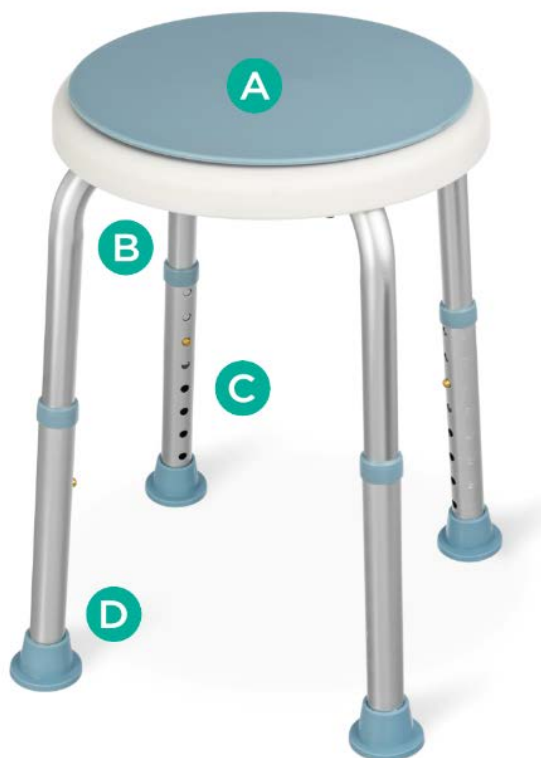

2. Anwendung

Der Duschstuhl ist ein Hilfsmittel, das dem Benutzer bei der Durchführung hygienischer Tätigkeiten hilft. Der Stuhl wird für Personen mit eingeschränkter Mobilität empfohlen, die die selbstständige Durchführung von Aktivitäten des täglichen Lebens verhindern oder behindern. Der Stuhl kann in der Dusche, in der Badewanne, in

Badezimmern und anderen feuchten Räumen zu Hause und in Krankenhäusern verwendet werden.

3. Montage und allgemeine Nutzungsempfehlungen

Schritt 1. Legen Sie den Sitz verkehrt herum auf eine flache Oberfläche.

Schritt 2. Gekreuzte Grundrohre mit Sitzfläche mittels vier Flügelschrauben mit Kunststoff- und Metallscheiben fixieren. Hellere Flügelschraube mit Unterlegscheiben in die Mitte schrauben.

Schritt 3. Basisrohre mit Beinen verbinden.

HÖHENVERSTELLUNG

- Um die Höhe des Duschstuhls einzustellen, drücken Sie den Metallstift, wählen Sie die entsprechende Beinhöhe aus und fixieren Sie die Position der Rohre relativ zueinander mithilfe des Stifts. Die Beine sind in 2,5-cm-Schritten einstellbar.

Hinweis! Die Stifte müssen in jedem Bein auf der gleichen Höhe angebracht sein.

4. Technische Daten

Breite	33 cm
Höhe	34,5-52 cm
Sitzdurchmesser	32 cm
Gewicht	1,95 kg
Maximale Kapazität	110 kg

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Toilettenstuhls, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Wartung

Führen Sie regelmäßige Wartungen des technischen Zustands des Stuhls durch:

- Reinigen Sie den Toilettensstuhl regelmäßig ausschließlich mit Wasser und milden Reinigungsmitteln. Trocknen Sie ihn gründlich ab.
- **Verwenden Sie** zum Reinigen keine starken Polier- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Benzin oder Lösungsmittel (dies kann zu Rahmenschäden, sichtbaren Mängeln und in der Folge zum Verlust des Garantieanspruchs führen).
- Toiletteneimer und Toilettensitz nach jeder Benutzung entleeren und desinfizieren. Toilettenreiniger nach Herstellerangaben verwenden.

7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung



Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group
Ossowski spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



12/2024 (IV)